

نکات مهم در استفاده از چراغ مادون قرمز

طریقه روشن کردن :

1. دوشاخه را به برق بزنید و کلید روی دستگاه را روشن کنید.
 2. کلید تایمر را لمس کرده و زمان را تنظیم کنید پس از ۱۰ ثانیه چراغ روشن می شود.
 3. حتما دیمر را در حد لازم تنظیم کنید چون امکان خاموش کردن با دیمر نیز وجود دارد.
- لطفا موارد زیر را در استفاده از چراغ مادون قرمز جدا رعایت فرمایید:

1. لامپ را با نیروی زیاد روی سرپیچ سفت نکنید ممکن است انتهای لامپ بشکند.
2. از یک سیم رابط بلند استفاده کنید تا سیم چراغ کشیده نشود.
3. در تنظیم زاویه و ارتفاع تابش از سفتی پیچ های مفاصل تنظیمی اطمینان حاصل نمایید . **
4. در مدل جنرال نسبت به استفاده از چراغ ، باید به فواصل زمانی مناسب یک ریگلاژ پیچ های مفصلی انجام شود.
5. حتما پیچ های محافظ توری را تا آخر ببندید .
6. هنگام روشن بودن چراغ از تکان های شدید چراغ خوداری نمایید ممکن است لامپ بسوزد .
7. برای تنظیم تابش از دسته مخصوص استفاده نمایید کلاhek شدیداً داغ می باشد.
8. از تراوش مایعات روی لامپ جلوگیری نمایید چون ممکن است لامپ بسوزد.
9. در صورتیکه احساس میکنید گرمای لامپ کافی نیست با اهمتر برق ساختمان را بررسی کنید. در مکان های که از مرکز دور باشند برق ضعیف تر خواهد بود و به تبع آن المنت لامپ به حد کافی گرما تولید نخواهد نمود.
10. برای تمیز کاری از دستمال مرطوب و خشک استفاده نمایید و هرگز آب به قسمت های برقی نزنید.
11. برای درخواست خدمات به شماره های زیر متن با اطلاعات کامل از خریدار بزنید ارسال عکس و فیلم ما را در خدمت رسانی بهتر، یاری می نماید. :

09306297770- 09104948010

09306297770- 09104948010 برای درخواست خدمات به شماره های زیر متن بزنید.:

TEL : 021- 66028710 – 12

WhatUp: 09306297770 - 09104948010

WebSite: IranMed.co

تاسیس
۱۳۷۶

نواوران



IranMed.co

تهران، میدان توحید، نصرت غربی، اول ستایش، پلاک ۲

TELL : 021- 66028710 – 12

WhatUp: 09306297770 - 09104948010

WebSite: IranMed.co