

## توصیه‌های مهم قبل از استفاده از ایزی استند

با تشکر از انتخاب شما خواهشمندیم قبل از استفاده از دستگاه مطالب زیر را کامل و با دقت مطالعه فرمایید

نشیمنگاه این دستگاه از تخته‌های صیقلی ساخته شده تا بیمار به راحتی و بدون اصطکاک در مسیر ایستادن جابجا شود

از آنجایی که هدف این دستگاه نشستن بیمار نیست و اولویت با صیقلی بودن این نشیمنگاه می‌باشد

۱- هنگامی که از جک استفاده می‌کنید تا بیمار از حالت نشسته به حالت ایستاده بیاید حتماً قبل از این کار ساپورت سینه و شکم را تا انتهای دامن باز نگه دارید و پس از ایستادن بیمار آنها را روی سینه یا شکم قرار داده و پیچ آن را سفت کنید در غیر این صورت هنگامی که از جک استفاده می‌کنید ناگهان به سینه و شکم بیمار فشار زیادی از طرف جک وارد می‌شود و بیمار آزرده خواهد شد .

تذکر مهم ۱: جک به آرامی بیمار را بلند می‌کند اما شما باید خیلی دقت کنید تا مبادا بین قطعات دستگاه که به هم نزدیک می‌شوند دست بیمار گیر کند و آزرده شود.

۲- وقتی از جک استفاده می‌کنید تا بیمار را به حالت ایستاده در بیاورید حتماً پدهای جانبی یا پدهای پهلو را از جایشان در بیاورید و پس از ایستادن بیمار آنها را جا بزنید چرا که ممکن است در طی ایستادن این پدها با آرم رست‌ها یا جا دستی های صندلی در مقابل هم قرار گیرند و فشار حاصل از آن موجب آسیب و دفرمیتی صندلی گردد.


۳- دقت بفرمایید پدهای زانویی روی ساق پا و زیر زانو قرار بگیرد مبادا روی خود مفصل زانو قرار بگیرد و موجب آزردگی کشکک بیمار شود .

۴- در حالت نشسته بهتر است پدهای زانویی یک فاصله ۷ سانتی متری با ساق پا داشته باشند،

تا در طول بلند شدن فشار زیادی به ساق بیمار وارد نشود البته ممکن است این ۷ سانتی متر در بیماران مختلف با قدهای مختلف متفاوت باشد.

۵- توصیه می‌کنیم از این دستگاه برای بیماران سنگین وزن بیش از ۱۰۰ کیلو استفاده نشود زیرا دستگاه شما آسیب خواهد دید.

۶- قبل از شروع گام زدن با این دستگاه حتماً باید تمام پیچ‌ها سفت شده باشد تا دستگاه صدای اضافی نداشته باشد غیر از پیچ‌های تنظیم کننده پد ساق پا که حتماً باید در حالت نیمه شل باشند تا حرکت روان انجام شود سفت کردن آنها موجب سختی حرکت می‌شود و اتفاقاً یکی از جاهاییست که در صورت نیاز می‌توانید روغن کاری هم بکنید.

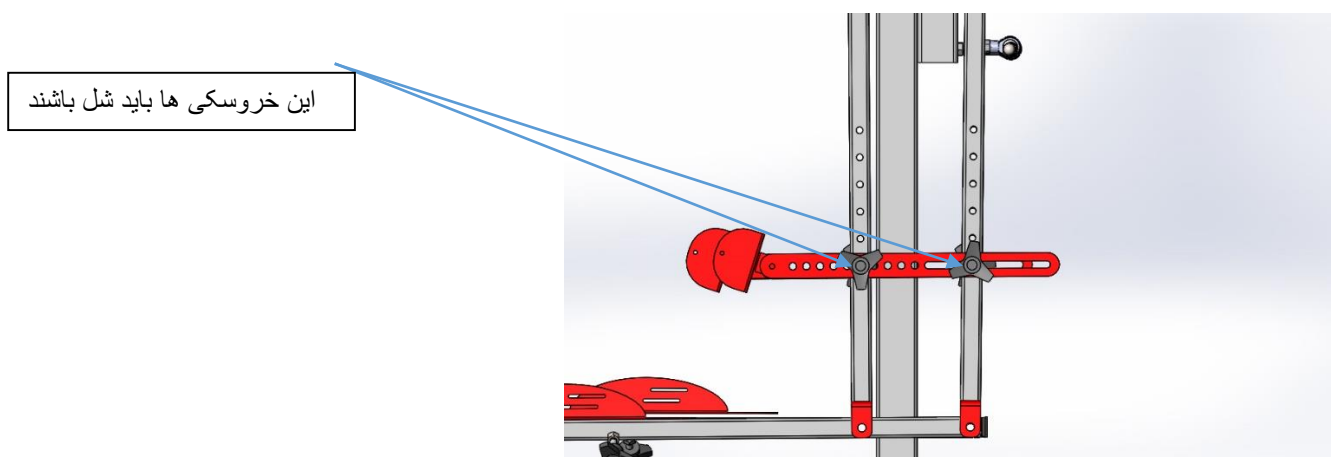

۷- این دستگاه هم مثل تمام دستگاه‌های مکانیکی نیاز به روغن کاری دارد. هر قسمتی از دستگاه که حالت مفصل دارد و دو قطعه نسبت به یکدیگر حرکت دارد مابینشان باید روغن کاری شود. یکی از جاهایی که روغن کاری باعث طول عمر آن می‌شود خود پیچ‌ها هستند پیچ‌ها یا خروسکی‌ها را کامل باز کنید نوکشان را آغشته به روغن کنید و بعد دوباره ببندید (البته این کار برای مرتبه اول در کارخانه انجام شده است لذا برای دوره‌های آتی آن را فراموش نکنید).

با تشکر

شرکت نوآوران توانبخش