

نکات مهم در استفاده از تخت برقی

لطفا موارد زیر را در استفاده از این تخت جدا رعایت فرمایید :

- 1- هرگز جک را مکرراً و بدون وقفه بالا و پایین نکنید. ظرفیت هر جک (Duty Cycle) روی لیبل آن مشخص شده است.
- 2- هنگام استفاده کردن از جک بیش از یک نفر روی تخت نباشد و بهتر است در وسط تخت بصورت دراز کشیده باشد تا تعادل نیرو ها حفظ شود .
- 3- هنگام استفاده کردن از جک هرگز روی لبه های تخت ننشینید.
- 4- برای افزایش طول عمر جک و مفاصل تخت بیش از ۱۵۰ کیلوگرم را بالا و پایین نکنید. جکها قدرتی بین ۶۱۱ الی ۸۱۵ کیلوگرم نیرو دارند اما بعلت اهرم بندی بیش از ۱۵۰ کیلوگرم نباید استفاده نمود.
- 5- قبل از بالا و پایین کردن تخت تمام قسمت های قابل تنظیم (شکلهای تخت را به حالت افق دریاورید در غیراینصورت موجب شکستگی جکهای گازی خواهید شد
- 6- هنگام بالا و پایین کردن تخت مراقب کودکان باشید که زیر تخت نباشند و هرگز روی تخت بالا و پایین نپزند. (در مصارف خانگی)***
- 7- از تنها گذاشتن کودکان با تخت های برقی جدا خودداری فرمایید. ممکن است در بازیهای کودکانه دست و پایشان لابلای بازو های تخت آسیب جدی ببیند. (در مصارف خانگی)***
- 8- هنگام بالا و پایین کردن تخت مراقب باشید تابوره یا وسیله دیگری زیر تخت نباشد.**
- 9- در تیلت تیبل دو موتوره با توجه به ارتفاع عمودی حتما مراقب برخورد با سقف باشید.**
- 10- در تیلت تیبل ها در وضعیت افقی یک یا دو پیچ ریگلاژ زیر آهن تشک قرار می گیرد که در استفاده افقی طولانی مدت فشاری به جک وارد نگردد ان پیچ های برای ۸۰ الی ۹۰ کیلو تنظیم شده است برای وزن های دیگر ابتدا کاملاً پیچ هارا ببندید بیمار روی تخت بخوابد تهت را افقی کنید سپس پیچ ها را بقدی باز کنید که کاملاً در تماس با زیر قسمت فلزی تشک تخت قرار بگیرد این ریگلاژ در مطب های لازم نیست . چون مدت زمان اعمال وزن در وضعیت افقی کوتاه می باشد.

- 11- هنگام بالا و پایین کردن تخت مراقب باشید سیمهای تخت لابلای بازوها خراب نشود.
- 12- در صورت شنیدن صدای جیر جیر مثل صدای لولای در ، مفاصل تخت را روغن کاری کنید.
- 13- برای تمیز کاری از دستمال مرطوب و خشک استفاده نمایید و هرگز آب به قسمت های برقی نزنید.
- 14- جک های گازی برای تسهیل تنظیم شکن های تخت همراه با وزن بیمار تعبیه شده اند بدون بیمار تنظیم آنها دشوار تر خواهد بود.
- 15- برای درخواست خدمات به شماره های زیر متن بزنید ارسال عکس و فیلم ما را در خدمت رسانی بهتر، یاری می نماید.:

09306297770- 09104948010