

نکات مهم در استفاده از محافظ تخت

ضمن تشکر از حسن انتخاب شما لازم به ذکر است شرکت نوآوران با استفاده از فنون مهندسی و الگو برداری از نمونه های خارجی این دستگاه را بر اساس ارگونومی بیماران طراحی نموده است و پس از ۳۰ سال سابقه تولید و عرضه این محصول به تعداد کثیری از مصرف کنندگان و متعهد بودن به اصلاح مداوم محصول بر اساس نظر افراد با تجربه و صاحب نام ، این شادباش و تبریک را خدمت شما معروض میدارد که بهترین انتخاب موجود را داشته اید

لطفا موارد زیر را در استفاده از این محصول جدا رعایت فرمایید :

۱- جهت نصب دستگاه ابتدا شاسی مربعی شکل را طبق تصویر شماره ۱ در جای خود بر روی دستگاه متصل کرده و دو عدد پیچ مربوطه را توسط اچار سفت نمایید سپس تشک تخت را بلند نموده و شاسی مربعی شکل را مانند تصویر شماره ۱ زیر تشک تخت قرار دهید حال میتوانید دو عدد پایه روی زمین را که در تصویر شماره ۲ با فلش رو به پایین مشخص شده را بچرخوانید تا کف پایه بر روی زمین قرارگیرد و وزن دستگاه را تحمل نماید حالا محافظ تخت آماده استفاده میباشد.

2- برای استفاده ابتدا ضامن افقی دستگاه را که در تصویر شماره ۲ با فلش رو به بالا نمایش داده شده را با دست به سمت بالا کشیده تا جایی که ضامن دستگاه آزاد شود حال میتوانید قسمت بالایی متحرک را به سمت چپ و یا راست بچرخوانید تا جایی که روبه زمین قرار گیرد.

3- از تنها گذاشتن کودکان با دستگاه جدا خودداری فرمایید. ممکن است در بازیهای کودکانه دست و پایشان لابلای بازوهای دستگاه آسیب جدی ببیند. (در مصارف خانگی)

4- در صورت بروز مشکل مراتب را به یکی از شماره های زیر واتس آپ فرمایید ارسال عکس و فیلم ما را در خدمت رسانی بهتر، یاری می نماید.

۰۹۳۰۶۲۹۷۷۷۰ ----- ۰۹۱۰۴۹۴۸۰۱۰

با تشکر فراوان

